



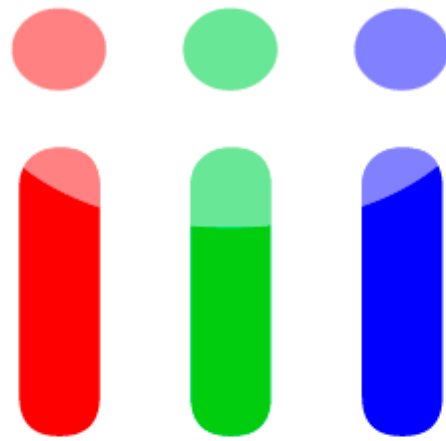


Vision Sensing

ShutterLessViewer for VIM
アプリケーションのインストール方法

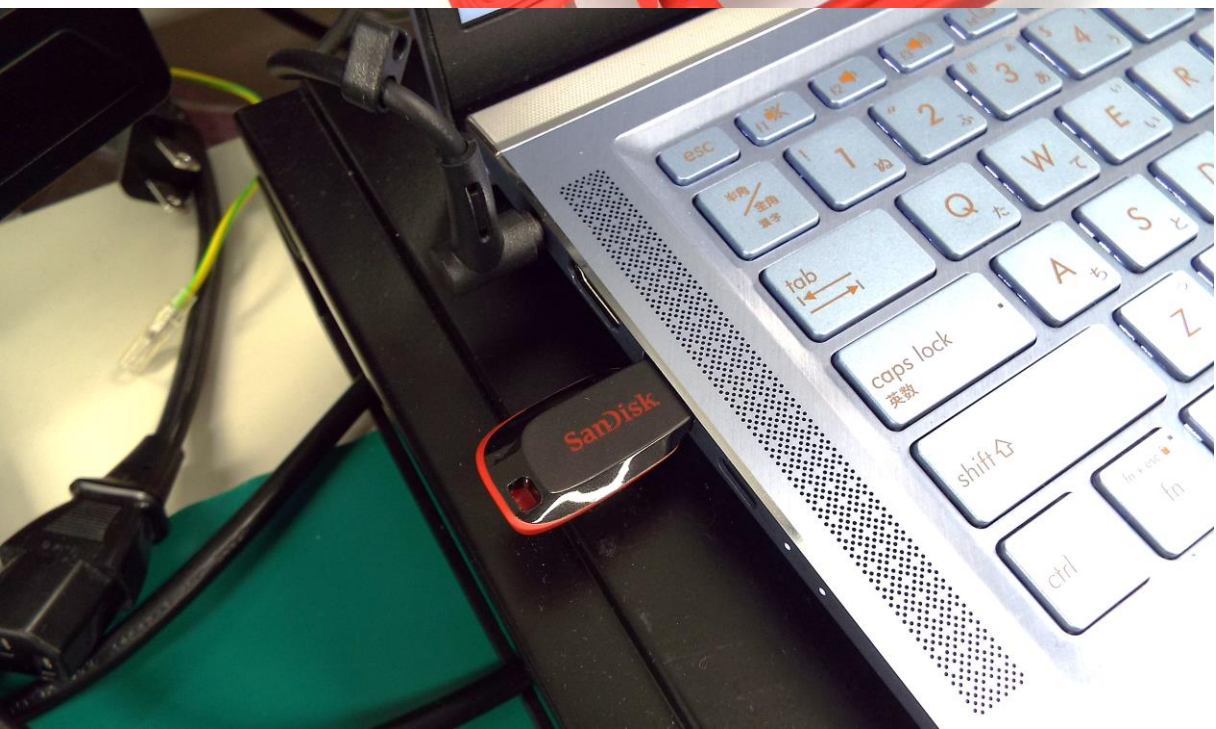


1.USBをお持ちのパソコンに差し込みます

ShutterLessViewer for VIM アプリケーションダウンロード方法

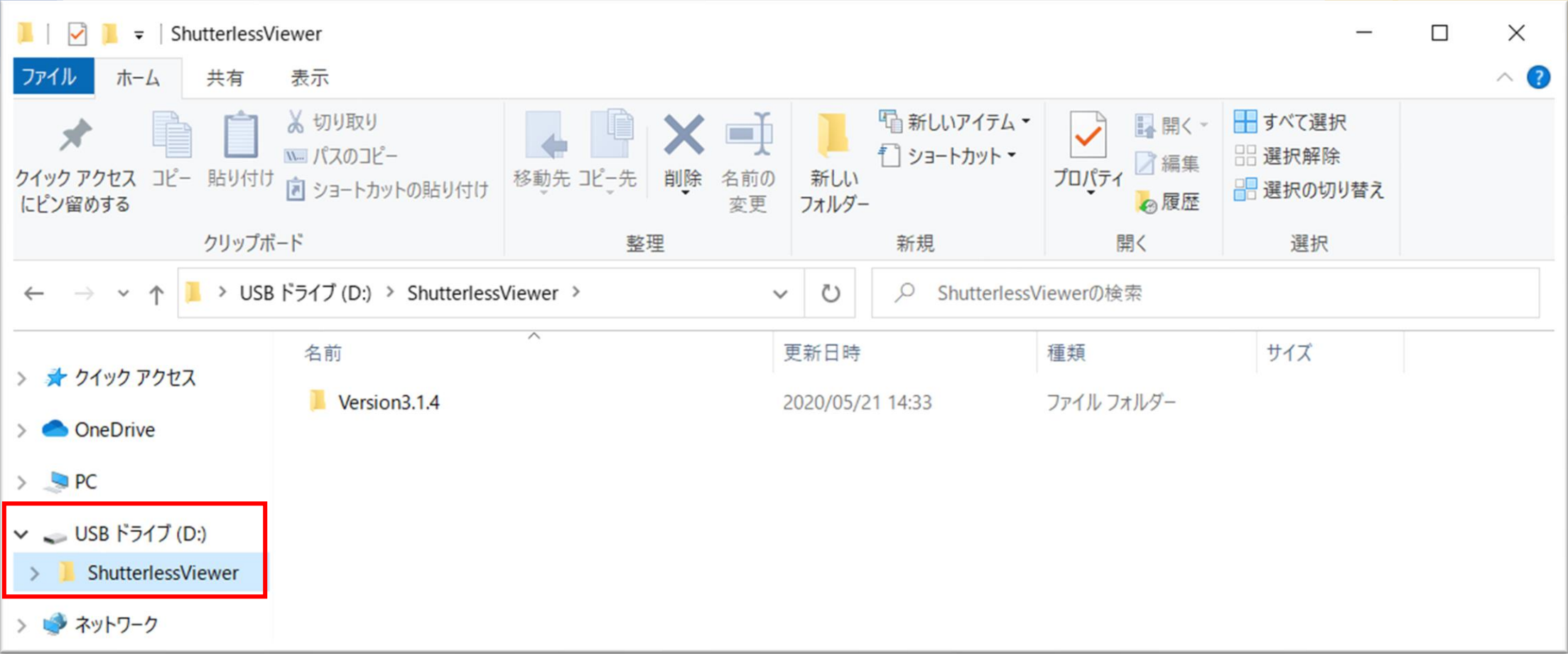

2.USBドライブ内の「ShutterLessViewer」フォルダをダブルクリックします。

ShutterLessViewer for VIM アプリケーションダウンロード方法

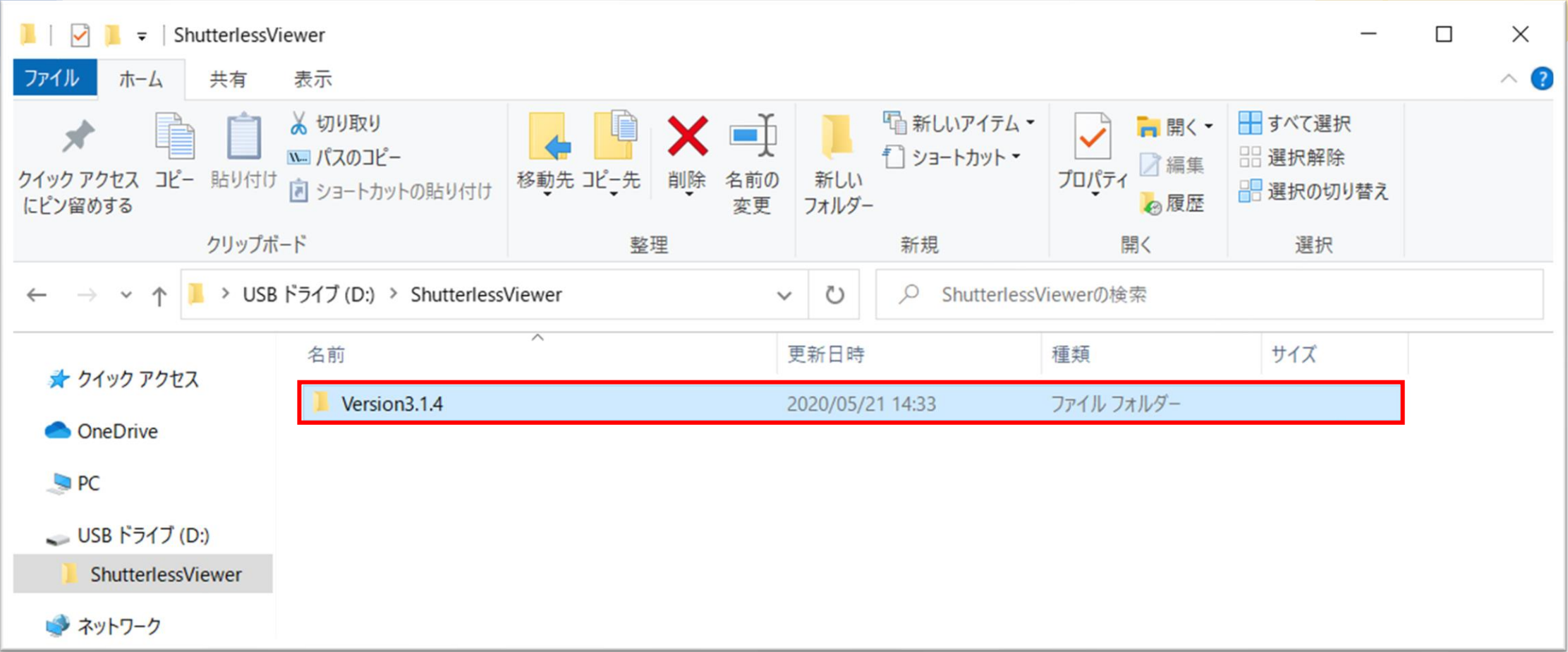


3. 「Version3.1.4」 フォルダをダブルクリックします。

数字はアプリケーションのバージョン名です。

お手持ちのUSBによっては、バージョンが異なる場合がありますが操作は同じです。


ShutterLessViewer for VIM アプリケーションダウンロード方法

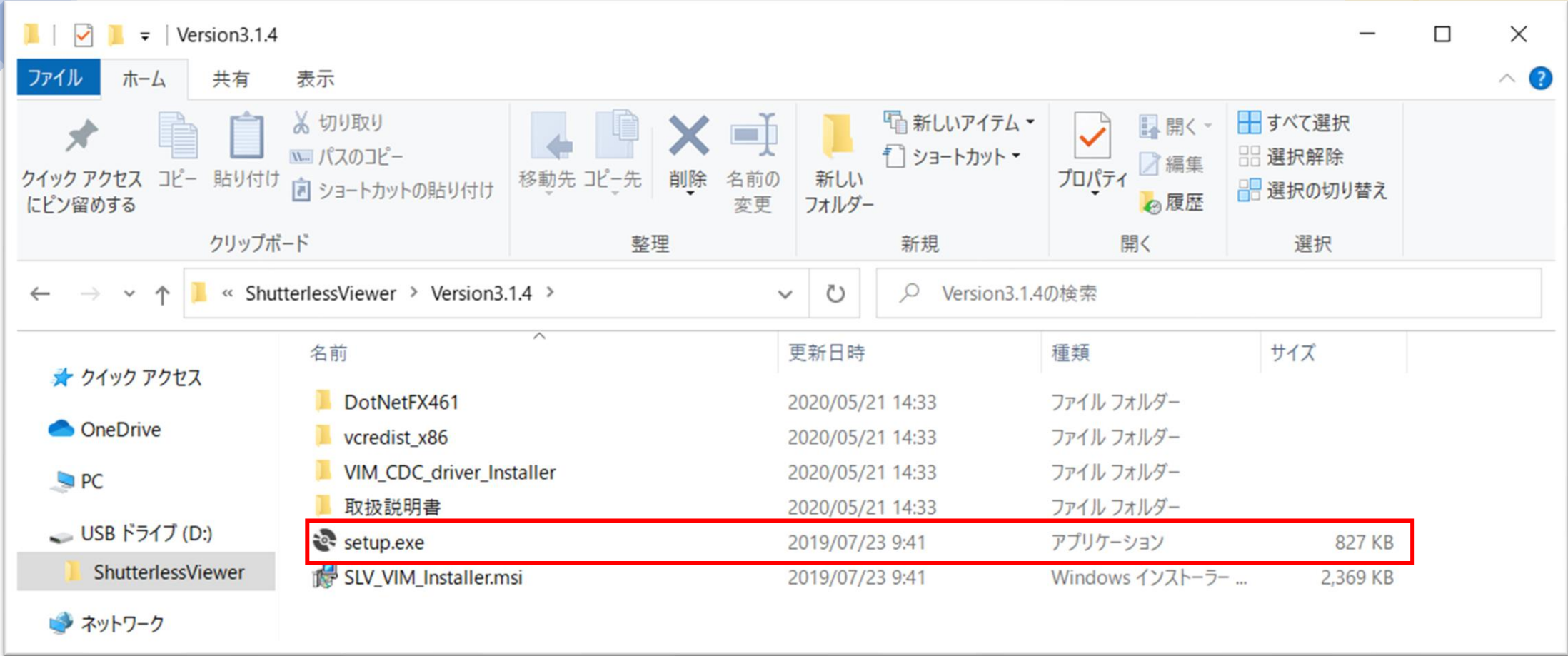

4. 「setup.exe」 をダブルクリックします。




手順5～7について
ご使用のパソコンによっては、
上記手順が不要な場合がありますが、
問題はありません。
表示されなかった場合は手順8へスキップしてください。

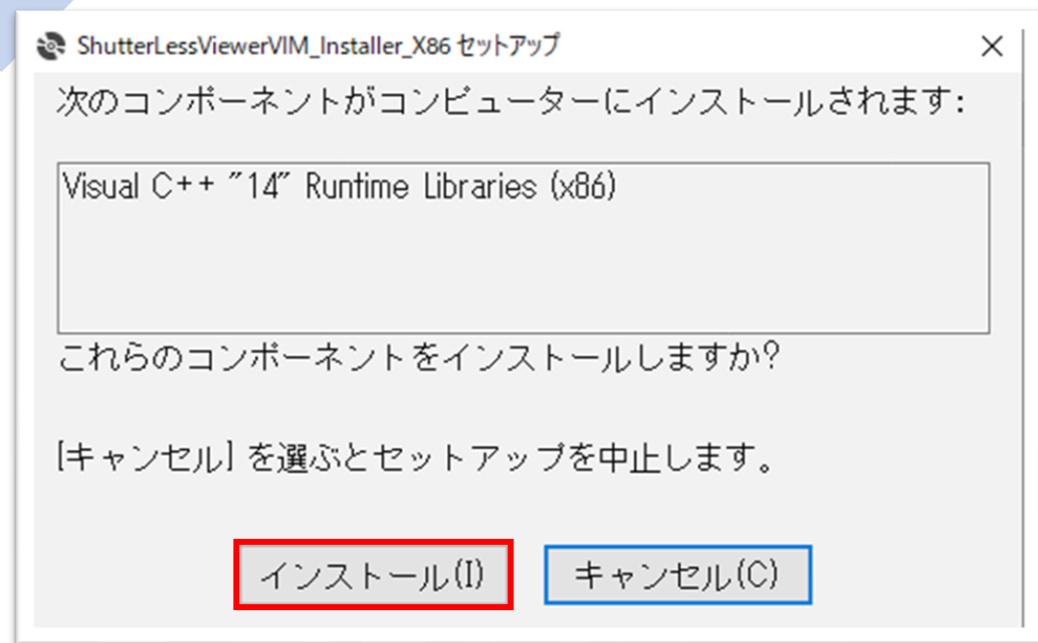

5. 「インストール」をクリックするとインストール開始画面に切り替わります。




6. 「ライセンス条項および使用条件に同意する」にチェックを入れ「インストール」をクリックすると、セットアップが完了されます。

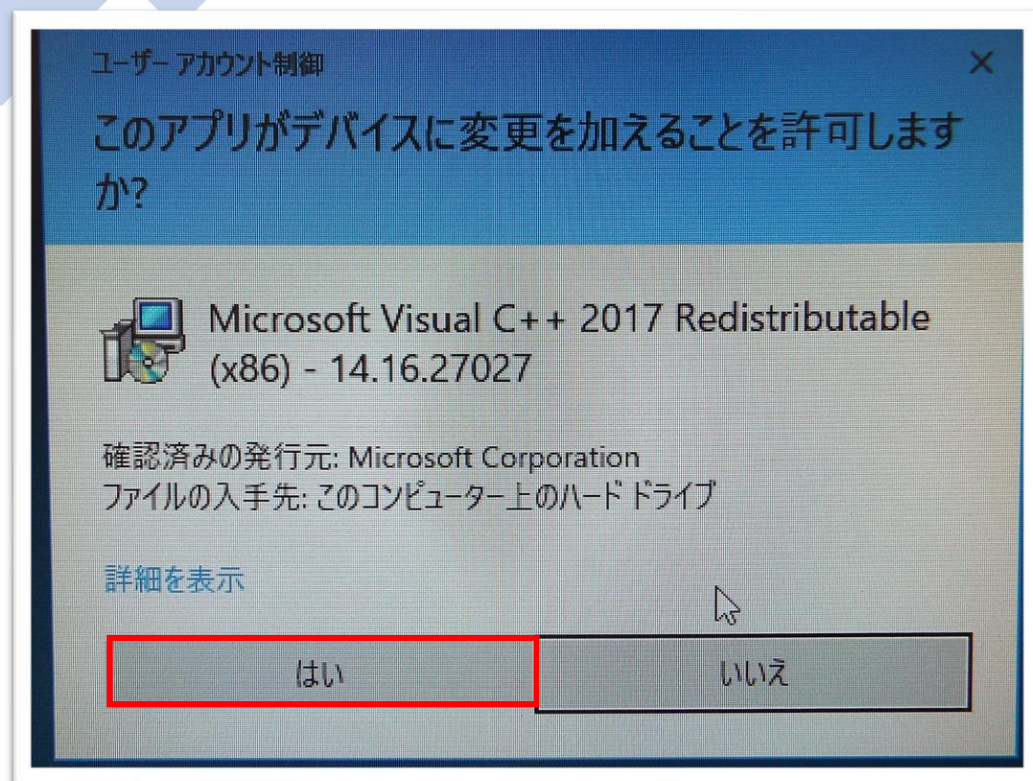


7. 確認ウィンドウが表示された場合「はい」をクリックしてください。
そのままインストールが完了されるまでお待ちください。

ShutterLessViewer for VIM アプリケーションダウンロード方法

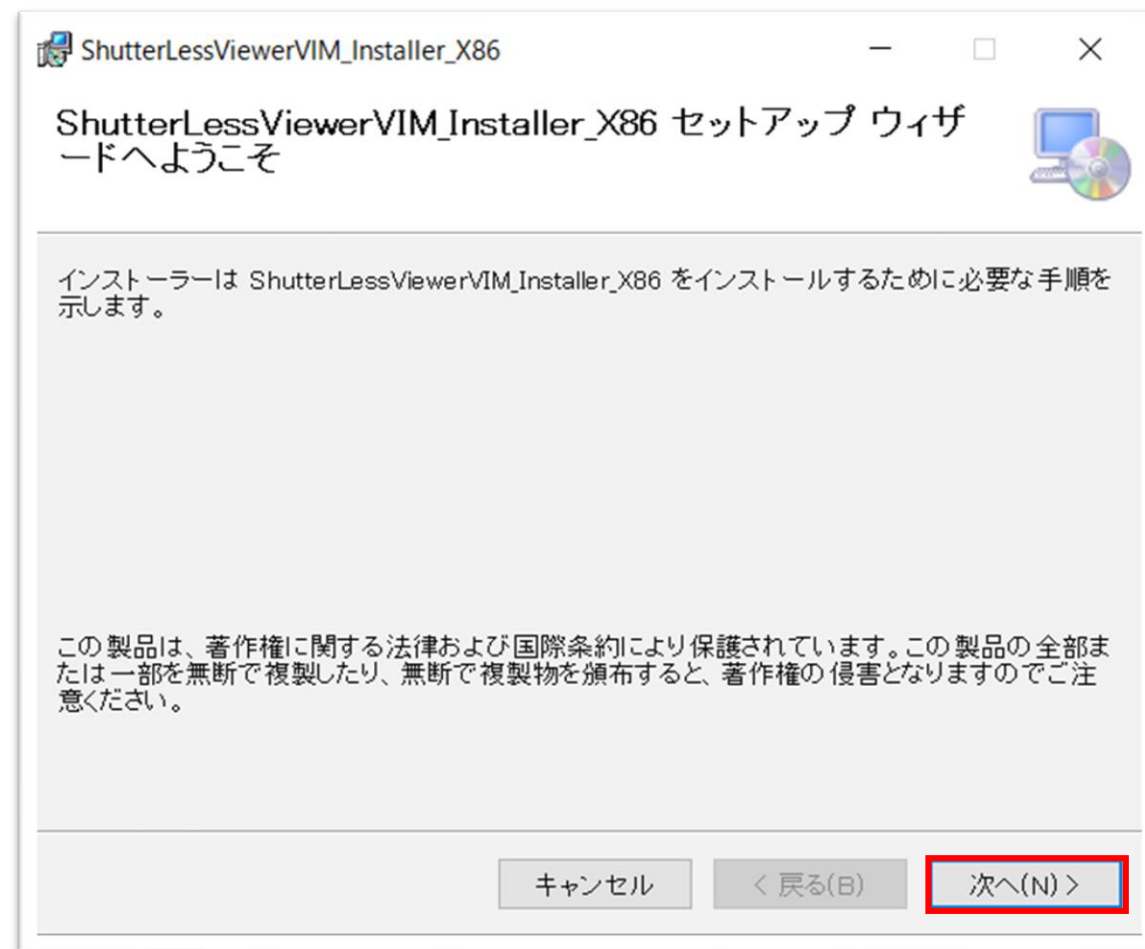


8. 「次へ」をクリックします。

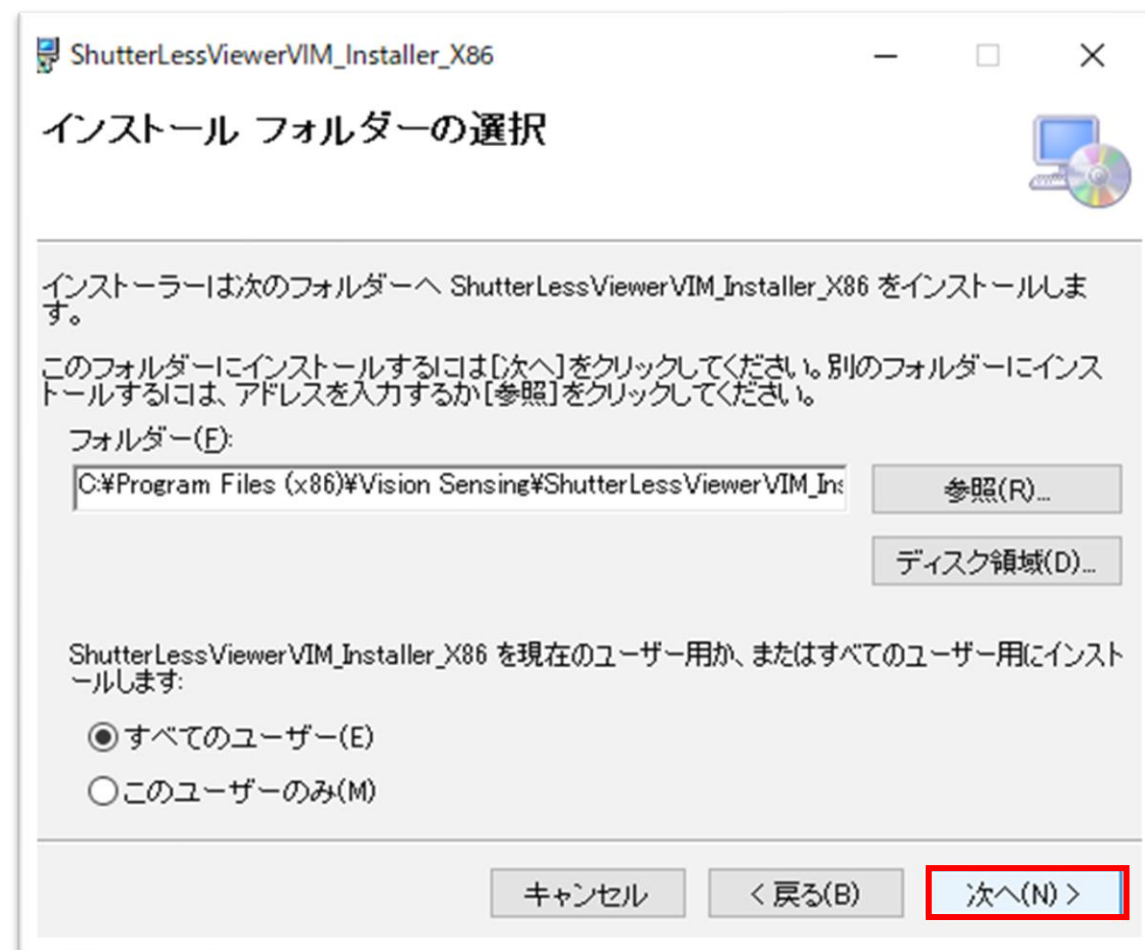


9. 「次へ」をクリックします。


ShutterLessViewer for VIM アプリケーションダウンロード方法

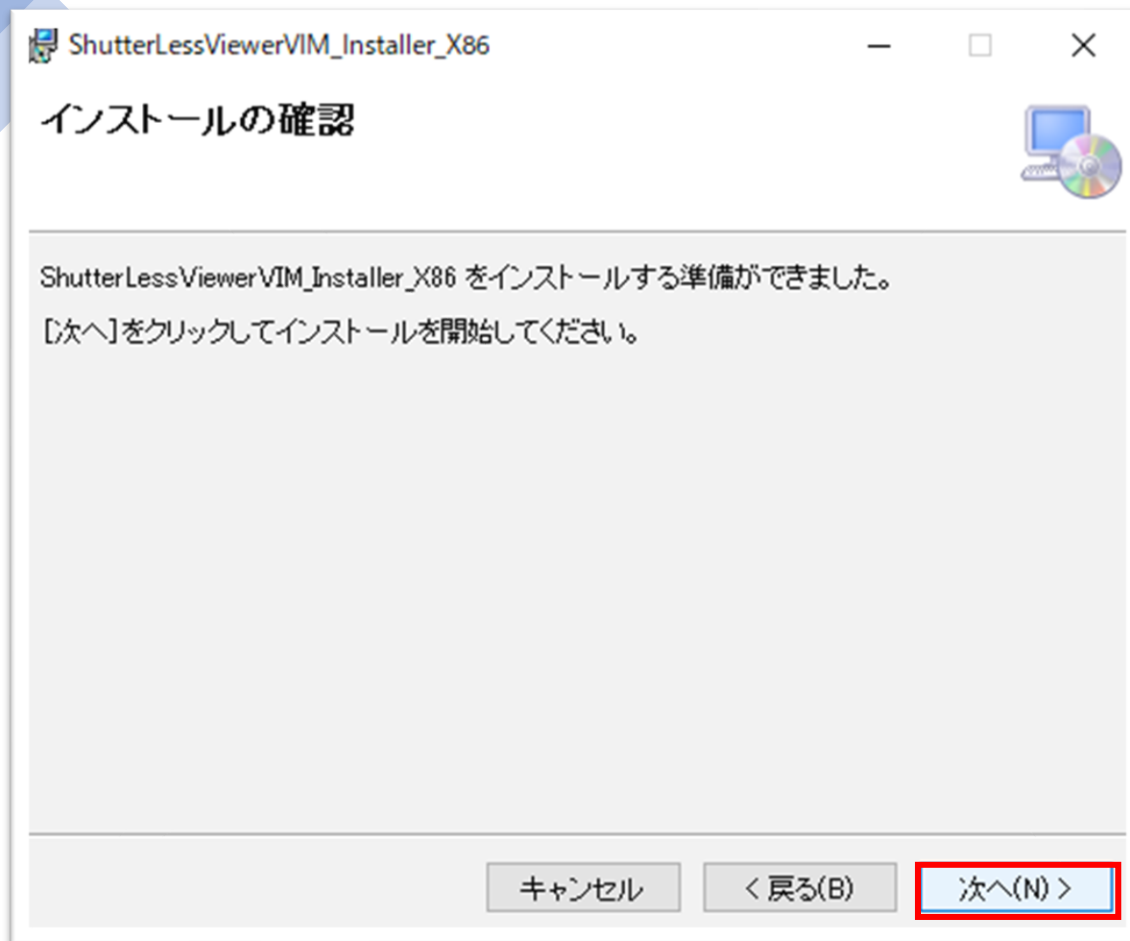

10. 「次へ」をクリックします。
確認ウィンドウが表示された場合「はい」をクリックしてください。

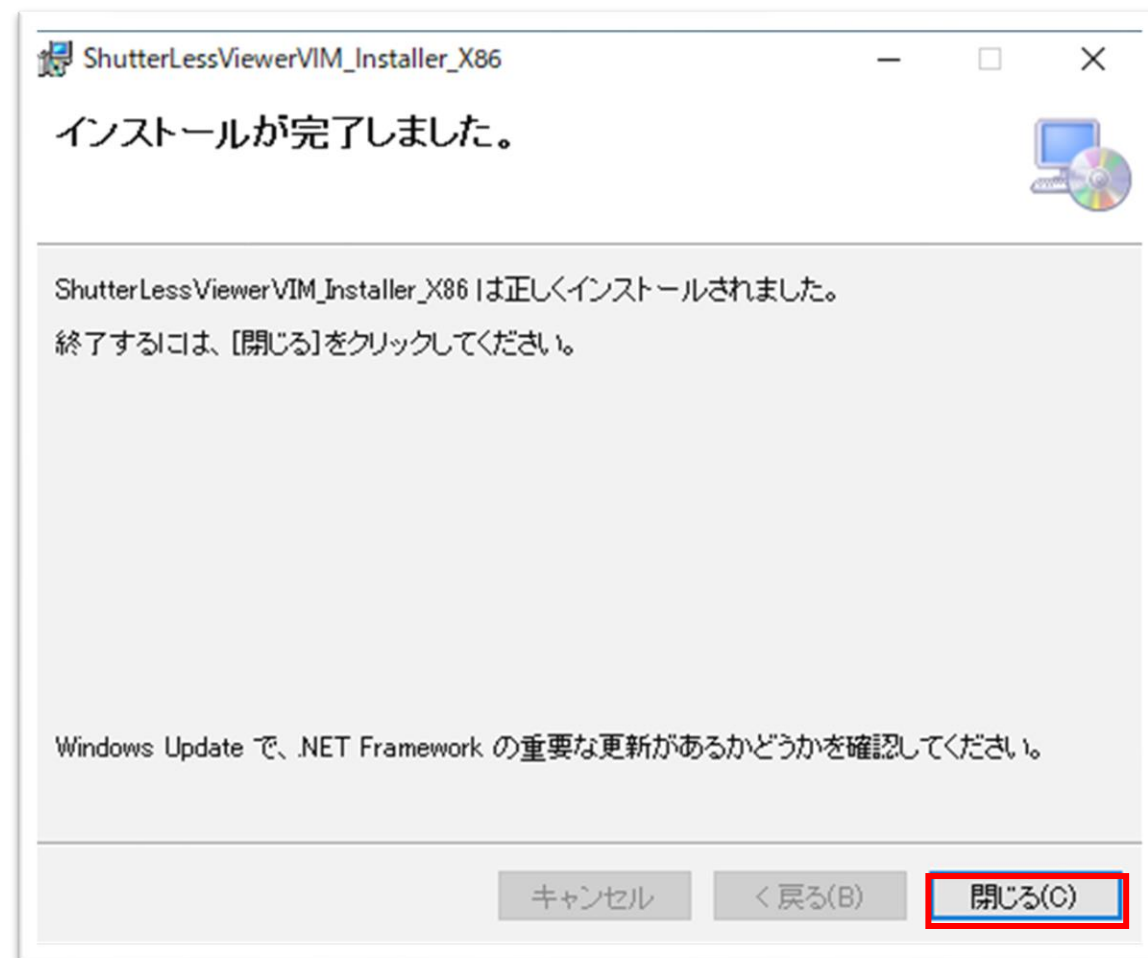


11.インストールが完了したら「閉じる」をクリックします。

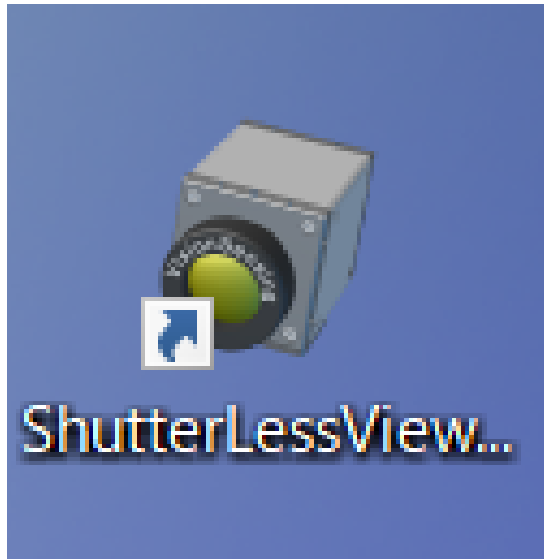

12.デスクトップに
アイコンが表示されていることを確認してください。



以上でインストールは完了となります。

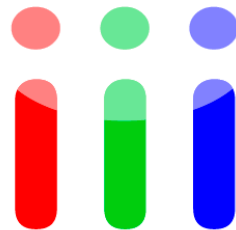

Vision Sensing

その他、ご不明点がございましたら
弊社までお問い合わせください。

株式会社ビジョンセンシング
大阪市北区与力町1-5与力町パークビル5F

TEL : 06-4800-0151

弊社問合せメールアドレス : info@vision-sensing.jp

弊社ウェブURL : <http://www.vision-sensing.jp>